

# BEISPIELE AUS DER PRAXIS

*Orthonyxie-Behandlungen  
im zeitlichen Verlauf*



**PODOSTRIPE®**  
KLEBSPANGE

**podo**fix®

COMBI  
ped

**3TO**  
SPANGE

[WWW.3TO.DE](http://WWW.3TO.DE)



## INDIVIDUELL

Auf den folgenden Seiten sehen Sie Behandlungsbeispiele mit den Nagelkorrekturspangen von 3TO. Da jeder Nagel und jedes Nagelwachstum individuell sind, variieren Behandlungsdauer und Behandlungsergebnis von Fall zu Fall.



SPANGEN-TYP	KLEBESPANGE		KOMBINATION	DRAHTSPANGE
	PODOSTRIPE	Podofix	COMBIped	3TO
Einseitig / Beidseitig	beidseitig	beidseitig	eine Seite stärker	beidseitig
Intensität	+	++	+++	+++
Einfache Anwendung	++++	+++	++	++
Risikopatienten (z.B. Diabetiker)	++++	++++	○	○
Nagelfalz nicht zugänglich/ Hypergranulation	geeignet	geeignet	bedingt	bedingt

# Für jeden Fall die optimale Spange

**Welche Spange ist die richtige für welchen Fall? Je nach Diagnose wird vom Therapeuten eine entsprechende Nagelkorrekturspanne gewählt.**

Die podofix und PODOSTRIPE Klebespangen aus Kunststoff eignen sich besonders für dünnere Nägel und leichtere Fälle eingewachsener Nägel.

Die 3TO-Drahtspangen und die kombinierte Draht-Klebespange COMBIped werden beidseitig oder einseitig unter den Nagelrand eingehängt und wirken daher etwas stärker. Bei Entzündungen ist die Abgrenzung mit einer Vlies-Tamponade, regelmäßige Kontrollen und evtl. die Zusammenarbeit mit einem Arzt von besonderer Bedeutung.

Vom eingewachsenen Nagel bis zum starken Rollnagel können nahezu alle Fälle mit diesen Spangen wieder in Form gebracht werden. Für die 3TO-Spange ist allerdings eine spezielle Schulung notwendig, wohingegen die anderen Spangentypen auch ohne Kurs angewendet werden können.

Welche Spange für den Patienten die perfekte Therapiemethode darstellt, entscheidet der Fußprofi nach der individuellen Diagnose. Häufig werden im Verlauf der Behandlung auch unterschiedliche Spangen eingesetzt - perfekt abgestimmt auf die aktuellen Bedürfnisse des einzelnen Nagels und Patienten.



## Die elastische Klebespange



### KANTIGE NÄGEL

Behandlungszeitraum 3 Monate · Fotos: Frau Negel-Riegel



### PROBLEMNÄGEL

Behandlungszeitraum 4 Monate · Fotos: Frau Negel-Riegel



Foto: Frau Negel-Riegel



Foto: Frau Negel-Riegel



Foto: Frau Negel-Riegel



Foto: Frau Negel-Riegel



## Die Aktiv-Klebespange



### EINGEWACHSENE NÄGEL

Behandlungszeitraum 3 Monate · Fotos: Dr. Scholz



### KLEINE NÄGEL

Behandlungszeitraum 6 Monate · Fotos: Frau Göhringer-Seel



Foto: Dr. Scholz

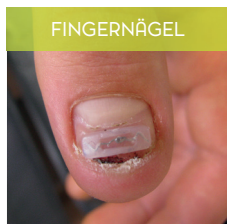


Foto: Frau Lauer




Foto: Dr. Scholz



Foto: Frau Göhringer-Seel



## Die intelligente Draht-Klebespange

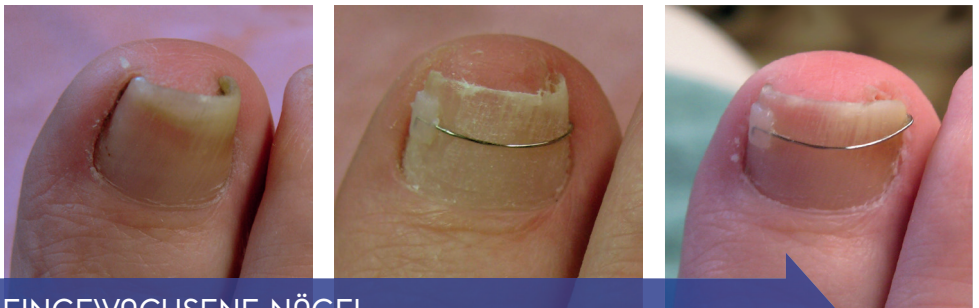

### EINGEWACHSENE NÄGEL

Behandlungszeitraum 2 Monate · Fotos: Frau Maurer



### ROLLNÄGEL

Behandlungszeitraum 2 Monate · Fotos: Frau Maurer



Foto: Frau Negel-Riegel



Foto: Frau Trenkler




Foto: Frau Negel-Riegel



Foto: Frau Kouba



# Die 3-teilige Drahtspange

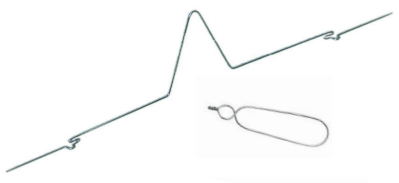

## ROLLNÄGEL

Behandlungszeitraum 18 Monate · Fotos: VAN SAN-SHO, INC., Tokyo, Dr. Shuzo Kawai



## KANTIGE NÄGEL

Behandlungszeitraum 3 Monate · Fotos: Herr Dr. Scholz



### DICKE NÄGEL

Foto: Herr Dr. Scholz




### ROLLNÄGEL

Foto: Herr Dr. Scholz



### EXTREMFÄLLE

Foto: Frau Maurer

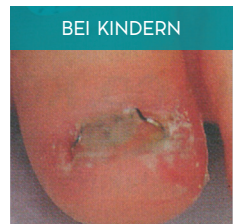

### BEI KINDERN

Foto: Herr Dr. Scholz



©2025 // 3TO GmbH // Diese Informationen sind ausschließlich für Fachpersonal und nicht zur Weitergabe an Patienten bestimmt



# 3TO SPEZIALIST FÜR NAGELSPANGEN

3TO GmbH  
Tölzer Straße 65  
82041 Deisenhofen, Deutschland

Telefon +49 (0) 89 45 20 833-0

info@3to.de  
www.3to.de  
shop.3to.de



[instagram.com/3to\\_nagelspangen](https://www.instagram.com/3to_nagelspangen)



[facebook.com/3to.gmbh](https://www.facebook.com/3to.gmbh)

WWW.3TO.DE